



**VENOSAN**<sup>®</sup>  
Meias Compressivas




**LÍDER** EM  
COMPRESSÃO  
E TRATAMENTO  
DE FERIDAS





A Venosan® Brasil, com mais de 25 anos de experiência, preza pelo mais alto padrão de qualidade em seus produtos. Investindo em tecnologia e inovação, oferece uma linha completa de produtos para saúde e bem-estar de seus usuários.

## MODELOS DISPONÍVEIS

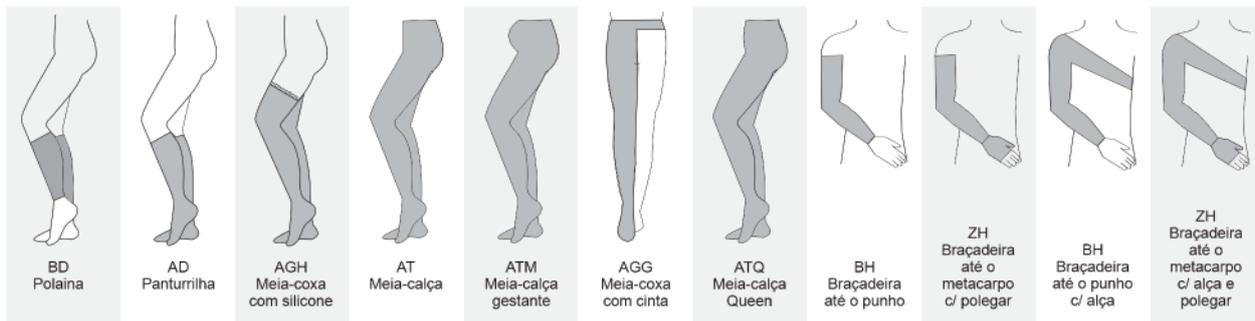

## COMO MEDIR

### PONTOS DE MEDIÇÃO

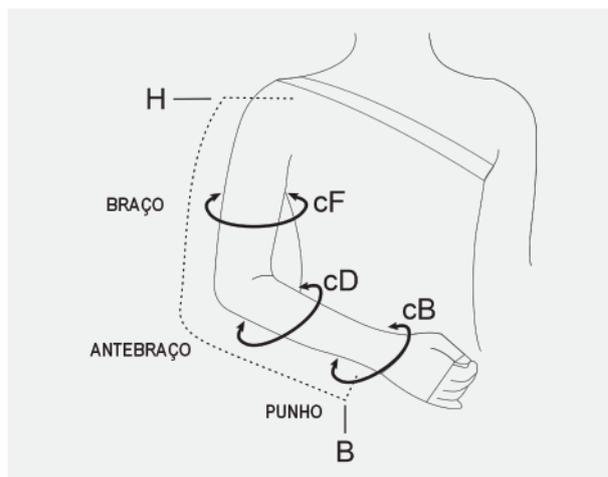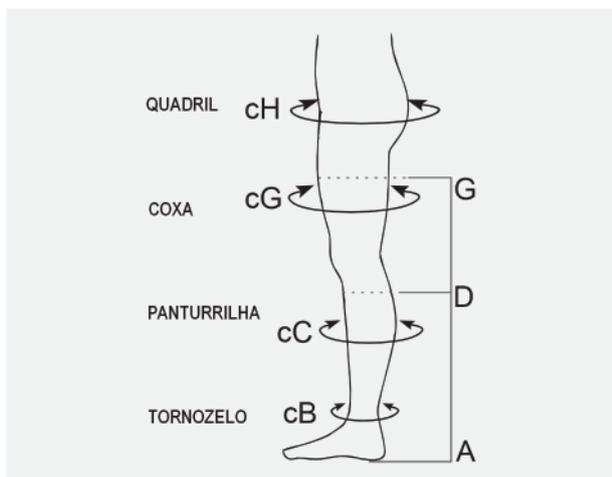

## INDICAÇÕES POR COMPRESSÃO

### 15 - 23mmHg 18 - 22mmHg

- Edema leve
- Pernas cansadas
- Trabalho em pé
- Gravidez
- Cirurgia venosa
- Viagens

### 18mmHg (AES)

- Imobilidade geral
- Períodos prolongados em leitos
- Antes, durante e após o parto
- Previne embolias (antes, durante e após cirurgias)

### 20 - 30mmHg

- Edema discreto
- Varicosidade leve
- Prevenção de varicosidade durante a gravidez

### 30 - 40mmHg

- Varizes com tendência a edema
- Insuficiência venosa crônica
- Pós-escleroterapia
- Operação de varizes

### ACIMA DE 40mmHg

- Compressão alcançada por sobreposição de meias
- Linfedema

## CONTRAINDICAÇÕES

Disfunções graves de circulação arterial, neuropatias agudas, microangiopatias agudas, pacientes acamados (exceto para suave compressão). Somente com orientação médica, as meias podem ser usadas em caso de: edema agudo, insuficiência cardíaca descompensada, dermatite úmida, após trombose profunda recente. Isentamo-nos de qualquer responsabilidade em caso de não observância destas contraindicações e outros de acordo com orientação médica.

# LEGLINE 15 - 23 mmHg / 20 - 30 mmHg

Para mulheres que cuidam da saúde sem abrir mão da elegância, conforto e bem-estar. Aliando transparência e maciez, tecnologia têxtil avançada e terapia elasto-compressiva graduada. Pernas bonitas com aparência suave e uniforme, unindo saúde e estética.

## INDICAÇÕES

### 15 - 23mmHg

- Edema leve
- Pernas cansadas
- Trabalho em pé
- Gravidez
- Cirurgia venosa
- Viagens

### 20 - 30mmHg

- Edema discreto
- Varicosidade leve
- Prevenção de varicosidade durante a gravidez

## COMPOSIÇÃO

75% Poliamida/Nylon  
25% Elastano/Spandex

## COMPRESSÃO

15 - 23 mmHg  
20 - 30 mmHg

## CORES



### Modelos

AD	Panturrilha
AGH	Meia-coxa com silicone
AT	Meia-calça
ATM	Meia-calça gestante
ATQ	Meia-calça queen

### Medidas do comprimento

AD (Da sola do pé até abaixo do joelho)	37 - 43 cm
AG (Da sola do pé até a coxa)	68 - 80 cm

### Medidas da circunferência

	Pequeno	Médio	Grande	X-Grande	XX-Grande
cB Tomozelo	18 - 21 cm	21 - 25 cm	25 - 29 cm	29 - 33 cm	33 - 38 cm
cC Panturrilha	28 - 38 cm	30 - 42 cm	32 - 46 cm	34 - 50 cm	43 - 55 cm
cG Coxa	40 - 62 cm	46 - 70 cm	54 - 78 cm	60 - 81 cm	66 - 84 cm

### Medidas da circunferência - Meia-calça queen

	Pequeno	Médio	Grande	X-Grande	XX-Grande
cB Tomozelo	18 - 21 cm	21 - 25 cm	25 - 29 cm	29 - 33 cm	33 - 38 cm
cC Panturrilha	28 - 38 cm	30 - 42 cm	32 - 46 cm	34 - 50 cm	43 - 55 cm
cG Coxa	44 - 64 cm	50 - 72 cm	58 - 80 cm	63 - 83 cm	70 - 86 cm
cH Quadril	80 - 110 cm	90 - 120 cm	95 - 125 cm	115 - 145 cm	130 - 155 cm



\* Modelo ATQ disponível apenas nas cores Olinda e Sahara

Produto cadastrado na ANVISA nº: 10349310003

# SUPPORTLINE SOFT

Meia de leve compressão com diversas cores, ideal para o dia a dia. Macia e confortável, indicada para homens e mulheres que estão em movimento ou por longo tempo na mesma posição, seja trabalhando, passeando, viajando ou praticando esportes. Diminui a fadiga e tensão nas pernas reduzindo o cansaço. Ajuda a aumentar o desempenho esportivo devido a aceleração da recuperação muscular.

## INDICAÇÕES

### 18 - 22mmHg

- Edema leve
- Pernas cansadas
- Trabalho em pé
- Gravidez
- Cirurgia venosa
- Viagens

## COMPOSIÇÃO

80% Poliamida/Nylon  
20% Elastano/Spandex

## COMPRESSÃO

18 - 22 mmHg

## CORES



### Modelos

AD	Panturrilha
----	-------------

### Numero do calçado

	PP	P	M	G	XG
Brasil	34 - 36	37 - 38	39 - 41	42 - 44	45 - 47
Argentina	36 - 38	39 - 40	41 - 43	44 - 46,5	47+
México	3 - 4,5	5,5 - 6	6,5 - 8	9 - 11	12+

### Medidas da circunferência

	PP	P	M	G	XG
cB Tomozelo	16,5 - 20,5 cm	19 - 21,5 cm	21,5 - 24 cm	23 - 26,5 cm	26,5 - 32 cm
cC Panturrilha	26,5 - 37 cm	28 - 38 cm	33 - 43,5 cm	35,5 - 46 cm	38,5 - 51,5 cm

\* Disponível no modelo pé fechado

Produto cadastrado na ANVISA nº: 10349310003



# ULTRALINE 4000

Meias e braçadeiras compressivas Super Premium, em fios e malhas com efeito climático, feitas com mais alto padrão de qualidade Suíço. Produzidas em microfibras Tactel e microemulsão de silicone (nanotecnologia)<sup>1</sup>, oferecendo uma agradável sensação climática. Garantem maior elasticidade e maciez no seu dia a dia, são mais confortáveis, sedosas, duráveis e fáceis de calçar.

## INDICAÇÕES

### 20 - 30mmHg

- Edema discreto
- Varicosidade leve
- Prevenção de varicosidade durante a gravidez

### 30 - 40mmHg

- Varizes com tendência a edema
- Insuficiência venosa crônica
- Pós-escleroterapia
- Operação de varizes

## COMPOSIÇÃO

71% Poliamida/Nylon  
29% Elastano/Spandex

## COMPRESSÃO

20 - 30 mmHg  
30 - 40 mmHg

## CORES



Modelos			
AD		Panturrilha	
AGH		Meia-coxa com silicone	
AGG		Meia-coxa com cinta	
AT		Meia-calça	
ATM		Meia-calça gestante	
Medidas do comprimento			
AD (Da sola do pé até abaixo do joelho)	Curta	35 - 40 cm	37 - 43 cm
AG (Da sola do pé até a coxa)			68 - 80 cm
Medidas da circunferência			
	Pequeno	Médio	Grande
cB Tornozelo	18 - 23 cm	23 - 26 cm	26 - 29 cm
cC Panturrilha	28 - 39 cm	33 - 42 cm	36 - 45 cm
cD Abaixo do joelho	28 - 38 cm	32 - 41 cm	35 - 44 cm
cG Coxa	48 - 63 cm	54 - 67 cm	58 - 72 cm
			X-Grande
			XX-Grande

\* No modelo AD curta, na compressão 30 - 40 mmHg, disponível apenas na cor bege e ponteira aberta  
\* No modelo AD curta, na compressão 20 - 30 mmHg, disponível na cor preta, apenas ponteira fechada  
\* Microemulsão de silicone (nanotecnologia), disponível apenas nos modelos na cor preta

Produto cadastrado na ANVISA nº: 10349310003



# ULTRALINE BRAÇADEIRA

Versão para braço, indicada para prevenção e tratamento de linfedema pós-mastectomia e pós-trauma.

## INDICAÇÕES

### 30 - 40mmHg

- Prevenção e tratamento de linfedema pós-mastectomia
- Linfedema primário
- Linfedema pós-trauma

## COMPOSIÇÃO

64% Poliamida/Nylon  
36% Elastano/Spandex

## COMPRESSÃO

30 - 40 mmHg

## COR



Modelos			
BH		Braçadeira até o punho	
ZH		Braçadeira até o metacarpo com polegar	
Medidas da circunferência			
	Pequeno	Médio	Grande
cB Punho	14 - 17 cm	17 - 20 cm	20 - 23 cm
cD Antebraço	22 - 26 cm	26 - 30 cm	30 - 34 cm
cF Braço	24 - 30 cm	30 - 36 cm	36 - 42 cm

\* Braçadeira sem alça

Produto cadastrado na ANVISA nº: 10349310003



# COMFORTLINE COTTON

Meias e braçadeiras compressivas dermatologicamente testadas, produzidas com 100% de algodão em contato com a pele. Trazendo conforto, maciez e um maior índice de rigidez garantindo mais durabilidade e segurança. Disponíveis também na versão meias com Zíper, para facilitar o calçar.

## INDICAÇÕES

### 20 - 30mmHg

- Edema discreto
- Varicosidade leve
- Prevenção de varicosidade durante a gravidez

### 30 - 40mmHg

- Varizes com tendência a edema
- Insuficiência venosa crônica
- Pós-escleroterapia
- Cirurgia de varizes

## COMPOSIÇÃO

45% Poliamida/Nylon  
41% Algodão/Cotton  
14% Elastano/Spandex

44% Poliamida/Nylon  
40% Algodão/Cotton  
16% Elastano/Spandex

## COMPRESSÃO

20 - 30 mmHg

30 - 40 mmHg

## COR

BEGE

### Modelos

AD Panturrilha

### Medidas do comprimento

AD (Da sola do pé até abaixo do joelho) Curta Até 39 cm Longa Maior que 39 cm

### Medidas da circunferência

	Pequeno	Médio	Grande	X-Grande	XX-Grande
cB Tomozelo	19 - 23 cm	23 - 26 cm	26 - 29 cm	29 - 32 cm	32 - 35 cm
cC Panturrilha	30 - 38 cm	35 - 43 cm	39 - 47 cm	48 - 56 cm	54 - 62 cm
cD Abaixo do joelho	28 - 36 cm	33 - 41 cm	37 - 45 cm	46 - 54 cm	52 - 60 cm

\* Disponível apenas no modelo ponteira aberta

\* Disponível na versão com ZÍPER, somente no modelo AD, 20-30mmHg, com ponteira aberta

Produto cadastrado na ANVISA nº: 10349310003

Comfortline Cotton c/ Zíper: Produto cadastrado na ANVISA nº: 10349310017



# COMFORTLINE COTTON BRAÇADEIRA

Versão para braço, indicada para prevenção e tratamento de linfedema pós-mastectomia e pós-trauma.

## INDICAÇÕES

### 30 - 40mmHg

- Prevenção e tratamento de linfedema pós-mastectomia
- Linfedema primário
- Linfedema pós-trauma

## COMPOSIÇÃO

50% Poliamida/Nylon  
35% Algodão/Cotton  
15% Elastano/Spandex

## COMPRESSÃO

30 - 40 mmHg

## COR

BEGE

### Modelos

BH Braçadeira até o punho  
ZH Braçadeira até o metacarpo com polegar

### Medidas do comprimento

BH (Punho até o ombro) Curta Até 58 cm Longa Maior que 58 cm

### Medidas da circunferência

	Pequeno	Médio	Grande
cB Punho	14 - 17 cm	17 - 20 cm	20 - 23 cm
cD Antebraço	22 - 26 cm	26 - 30 cm	30 - 34 cm
cF Braço	24 - 30 cm	30 - 36 cm	36 - 42 cm

\* Braçadeira com alça

Produto cadastrado na ANVISA nº: 10349310003



# COMFORTLINE

Linha tradicional de meias compressivas, a combinação perfeita entre conforto e naturalidade, proporcionando agradável sensação no uso. Produzidas com tecnologia sofisticada a partir de elastano com duplo recobrimento de última geração, promovendo maior índice de rigidez, garantindo segurança e maior durabilidade.

## INDICAÇÕES

### 20 - 30mmHg

- Edema discreto
- Varicosidade leve
- Prevenção de varicosidade durante a gravidez

### 30 - 40mmHg

- Varizes com tendência a edema
- Insuficiência venosa crônica
- Pós-escleroterapia
- Cirurgia de varizes

## COMPOSIÇÃO

80 - 86% Poliamida/Nylon  
14 - 20% Elastano/Spandex

76 - 84% Poliamida/Nylon  
16 - 24% Elastano/Spandex

## COMPRESSÃO

20 - 30 mmHg

30 - 40 mmHg

## COR



### Modelos

AD	Panturrilha
AGH	Meia-coxa com silicone
AGG	Meia-coxa com cinta
AT	Meia-calça

### Medidas do comprimento

AD (Da sola do pé até abaixo do joelho)	Curta Até 39 cm	Longa Maior que 39 cm
AG (Da sola do pé até a coxa)	Até 72 cm	Maior que 72 cm

### Medidas da circunferência

	Pequeno	Médio	Grande
cB Tomozelo	19 - 23 cm	23 - 26 cm	26 - 29 cm
cC Panturrilha	30 - 38 cm	35 - 43 cm	39 - 47 cm
cD Abaixo do joelho	28 - 36 cm	33 - 41 cm	37 - 45 cm
cG Coxa	49 - 61 cm	54 - 66 cm	60 - 72 cm

\* Disponível apenas no modelo ponteira aberta

\* AGG Disponível apenas na compressão (30 - 40 mmHg)

Produto cadastrado na ANVISA nº: 10349310003



# VENOSAN® 6000

Indicada para homens e mulheres, desenhada especialmente para pessoas modernas e ativas. Uma nova era de meias medicinais com alta sensibilidade e conforto. A sua textura proporciona a suavidade da seda, sendo elegante, fina e muito confortável, unindo saúde e estética.

## INDICAÇÕES

### 20 - 30mmHg

- Edema discreto
- Varicosidade leve
- Prevenção de varicosidade durante a gravidez

### 30 - 40mmHg

- Varizes com tendência a edema
- Insuficiência venosa crônica
- Pós-escleroterapia
- Cirurgia de varizes

## COMPOSIÇÃO

65% Poliamida/Nylon  
35% Elastano/Spandex

## COMPRESSÃO

20 - 30 mmHg

30 - 40 mmHg

## CORES



### Modelos

AD	Panturrilha
AGH	Meia-coxa com silicone
AT	Meia-calça

### Medidas do comprimento

AD (Da sola do pé até abaixo do joelho)	37 - 43 cm
AG (Da sola do pé até a coxa)	68 - 80 cm

### Medidas da circunferência

	Pequeno	Médio	Grande	X-Grande	XX-Grande
cB Tomozelo	18 - 21 cm	21 - 25 cm	25 - 29 cm	29 - 33 cm	33 - 38 cm
cC Panturrilha	28 - 38 cm	30 - 42 cm	32 - 46 cm	34 - 50 cm	43 - 55 cm
cG Coxa	40 - 62 cm	46 - 70 cm	54 - 78 cm	60 - 81 cm	—

\* AGH e AT, 20 - 30 mmHg e 30 - 40 mmHg, somente até o tamanho XG

Produto cadastrado na ANVISA nº: 10349310003



# ULCERCOMFORT COM ZÍPER

Kit para o tratamento de úlcera venosa composto por 3 meias. Atua através de um sistema de sobreposição de 2 meias: 1 meia interna Legline Silver de compressão 10 - 15mmHg para troca diária, fabricada com fios impregnados de prata, e 1 meia externa Comfortline com Zíper de compressão 20 - 30mmHg. Sobrepostas atingem uma compressão média de 30 - 45mmHg.

## INDICAÇÕES

### 30 - 45mmHg

- Tratamento de úlceras venosas na perna (*ulcus cruris venosum*)
- Prevenção de reincidências para úlcera venosa após fechamento
- Prevenção de úlcera em caso de alterações dérmicas já existentes

## COMPOSIÇÃO

**Meia Interna / 1 Par:** Legline Silver  
89% Poliamida/Nylon  
10% Elastano/Spandex  
1% Fios impregnados com prata

## COMPRESSÃO

10 - 15 mmHg

## CORES



**Meia Externa:** Comfortline c/ zíper  
83% Poliamida/Nylon  
17% Elastano/Spandex

20 - 30 mmHg



Modelos

AD Panturrilha

Medidas do comprimento

AD (Da sola do pé até abaixo do joelho)

Curta	Longa
Até 39 cm	Maior que 39 cm

Medidas da circunferência

	Pequeno	Médio	Grande	X-Grande
cB Tornozelo	19 - 23 cm	23 - 26 cm	26 - 29 cm	29 - 32 cm
cC Panturrilha	30 - 38 cm	35 - 43 cm	39 - 47 cm	48 - 56 cm
cD Abaixo do joelho	28 - 36 cm	33 - 41 cm	37 - 45 cm	46 - 54 cm

Produto cadastrado na ANVISA nº: 10349310019

# ULCERAID

Kit para tratamento de úlcera venosa composto por 3 meias. Atua através de um sistema de sobreposição de 2 meias: 1 meia interna Legline Silver de compressão 10 - 15mmHg para troca diária, fabricada com fios impregnados de prata, e 1 meia externa Ultraline 4000 de compressão 20 - 30mmHg. Sobrepostas atingem uma compressão média de 30 - 45mmHg.

## INDICAÇÕES

### 30 - 45mmHg

- Tratamento de úlceras venosas na perna (*ulcus cruris venosum*)
- Prevenção de reincidências para úlcera venosa após fechamento
- Prevenção de úlcera em caso de alterações dérmicas já existentes

## COMPOSIÇÃO

**Meia Interna / 1 Par:** Legline Silver  
89% Poliamida/Nylon  
10% Elastano/Spandex  
1% Fios impregnados com prata

## COMPRESSÃO

10 - 15 mmHg

## CORES



**Meia Externa:** Ultraline 4000  
71% Poliamida/Nylon  
29% Elastano/Spandex

20 - 30 mmHg



Modelos

AD Panturrilha

Medidas do comprimento

AD (Da sola do pé até abaixo do joelho)

37 - 43 cm
------------

Medidas da circunferência

	Pequeno	Médio	Grande	X-Grande
cB Tornozelo	18 - 23 cm	23 - 26 cm	26 - 29 cm	29 - 32 cm
cC Panturrilha	28 - 39 cm	33 - 42 cm	36 - 45 cm	39 - 50 cm
cD Abaixo do joelho	28 - 38 cm	32 - 41 cm	35 - 44 cm	38 - 46 cm

Produto cadastrado na ANVISA nº: 10349310003

# AES

Meias antiembolia e antitrombo, auxiliam no aumento da velocidade sanguínea na circulação venosa. Contribuem igualmente para prevenir a formação de coágulos que provocam trombose e embolias pulmonares. Disponível também na versão estéril para uso durante a cirurgia.

## INDICAÇÕES

### 18mmHg

- Imobilidade geral
- Períodos prolongados em leitos
- Antes, durante e após o parto
- Previne embolias (antes, durante e após cirurgias)

## COMPOSIÇÃO

89% Poliamida/Nylon  
11% Elastano/Spandex

## COMPRESSÃO

18 mmHg

## COR

BRANCA

### Modelos

AD	Panturrilha
AGH	Meia-coxa com silicone

### Medidas do comprimento

	Pequeno	Médio	Grande	X-Grande	XX-Grande
AD (Da sola do pé até abaixo do joelho)	Até 41 cm	Até 43 cm	Até 45 cm	Até 45 cm	Até 45 cm
AG (Da sola do pé até a coxa)			74 - 79 cm		

### Medidas da circunferência

	Pequeno	Médio	Grande	X-Grande	XX-Grande
cB Tornozelo	18 - 20 cm	20 - 22 cm	23 - 25 cm	25 - 27 cm	28 - 30 cm
cC Panturrilha	28 - 32 cm	32 - 37 cm	37 - 42 cm	42 - 47 cm	47 - 52 cm
cG Coxa	45 - 64 cm	53 - 71 cm	61 - 80 cm	70 - 84 cm	79 - 88 cm

\* Com ponteira para inspeção

Produto cadastrado na ANVISA nº: 10349310003

AES Estéril - Produto cadastrado na ANVISA nº: 10349310021



# SPORTACTIVE

Polaina compressiva produzida com mais alto padrão de qualidade. Criada especialmente para desportistas profissionais ou amadores. Confortável e com design que proporciona mais beleza e estilo no seu dia a dia. Melhora a performance diminuindo o tempo de recuperação muscular auxiliando na eliminação do ácido láctico. Aumenta o fluxo de oxigênio para o tecido muscular, beneficiando e promovendo mais eficácia no movimento, além de ajudar na recuperação pós-exercício.

## INDICAÇÕES

### 20-30mmHg

- Compressão e apoio para os músculos da panturrilha
- Redução da vibração muscular em atividades mais intensas, facilitando o processo de recuperação metabólica
- Alivia a dor e o desconforto associados à tensão muscular
- Melhora a circulação sanguínea e também uma melhor eliminação do ácido láctico
- Ajuda a manter a musculatura aquecida
- Auxilia na recuperação pós-exercícios

## COMPRESSÃO

20 - 30 mmHg

## COMPOSIÇÃO

69% Poliamida/Nylon  
31% Elastano/Spandex

## CORES



### Modelos

BD	Polaina
----	---------

### Medidas do comprimento

AD (Da sola do pé até abaixo do joelho)	37 - 43 cm
---	------------

### Medidas da circunferência

	Pequeno	Médio	Grande	X-Grande	XX-Grande
cB Tornozelo	18 - 23 cm	23 - 26 cm	26 - 29 cm	29 - 32 cm	32 - 38 cm
cC Panturrilha	28 - 39 cm	33 - 42 cm	36 - 45 cm	39 - 50 cm	43 - 55 cm
cD Abaixo do joelho	28 - 38 cm	32 - 41 cm	35 - 44 cm	38 - 46 cm	42 - 52 cm

Produto cadastrado na ANVISA nº: 10349310003



# VENOGLIDER®

Calçador de meias e braçadeiras compressivas criado especialmente para facilitar e ajudar no calçar. Prático de usar, pode ser levado na bolsa para qualquer lugar. Confeccionado em tecido 100% Poliamida/Nylon, com propriedades deslizantes de alta resistência, proporcionando total facilidade ao calçar meias e braçadeiras.

## INDICAÇÕES

- Pessoas acamadas ou com mobilidade reduzida que precisam ser vestidas por terceiros
- Pessoas com peso elevado
- Idosos

## COR

VERMELHA



# PICOPRESS®

## APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO DE INTERFACE

Dispositivo utilizado para medir a pressão na terapia compressiva, tanto em condições estáticas quanto dinâmicas. Possui um programa que permite a visualização de gráficos de alteração da compressão mediante a mudança de posição do paciente, além de salvar dados para posterior comparação e ajuste de prescrição. Foi desenvolvido para tornar a terapia compressiva objetiva e padronizada. Indicado para profissionais que lidam com compressão no seu dia a dia.

## ACESSÓRIOS

- 01 Bolsa para armazenamento e transporte do aparelho feito em material antiesmagamento
- 01 Aparelho PicoPress®
- 05 Sondas com sensores
- 01 CD para instalação do software operacional no computador
- Cabos para carregamento e conexão USB



BOLSA PICOPRESS®

# DVT-2600

## SISTEMA DE COMPRESSÃO PNEUMÁTICO

Segurança e eficiência na prevenção do tromboembolismo.  
A solução perfeita para prevenir a TVP e embolia pulmonar.

### INDICAÇÕES

- Profilaxia com compressão pneumática
- Cirurgia
- UTI
- Paciente acamado
- Associado com métodos farmacológicos
- Pacientes com alto risco de sangramento
- Pós-operatório, cirurgias de grande porte

### ESPECIFICAÇÕES

- Ajuste automático de voltagem: AC 100V a 240V, 50/60 Hz
- Baixo consumo de energia: 25w (35 VA)
- Ajustes de pressão (mmHg)  
Perna/coxa/panturrilha – 20, 30, 40, 50, 60  
Pé – 120, 130, 140
- Intervalo de tempo 24, 48, 60 segundos
- Peso 2,0 Kg
- Autonomia da bateria: 6 - 8 horas
- Medidas principais: (mm) 200 (L) x 165 (P) x 190 (A)

### COMPRESSÃO SEQUENCIAL E COINCIDENTE DAS DUAS PERNEIRAS

DVT-2600 possui um exclusivo sistema de pressurização sequencial coincidente.

As câmaras de cada perna são infladas na mesma sequência, e ao mesmo tempo, do pé para a coxa, no sentido de se obter uma maior eficiência e maior sensação de conforto ao paciente.

Produto cadastrado na ANVISA n°:  
Sistema de compressão: 10349319005  
Perneiras: 10349310023



**DOCTOR LIFE®**  
**DVT - 2600**



# CTC-7

## SISTEMA DE COMPRESSÃO FRIO/QUENTE



A CTC-7 é um Sistema de Compressão Frio/Quente indicado para reabilitação esportiva, pós-operatória e pré-cirurgia de fratura, auxiliando no alívio da dor aguda ou crônica.

O dispositivo reduz o edema e contém a inflamação, antecipando a alta hospitalar gerando uma celeridade no tratamento e economia de custos. Possui uma tecnologia inovadora, controlando o resfriamento sem a utilização de gelo.

RECURSOS	SEM UTILIZAÇÃO DE GELO	TEMPERATURA CONTÍNUA POR TEMPO DEFINIDO	DESIGN SUPERIOR DE ENVOLTÓRIOS
PROTOCOLOS	COMPRESSÃO FRIA	COMPRESSÃO QUENTE	MODO DE COMPRESSÃO DE CONTRASTE
VANTAGENS	ALARME E VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA ÁGUA	AUTO LIMPEZA A VAPOR	DRENAGEM AUTOMÁTICA

### ACESSÓRIOS

São projetados para maximizar a funcionalidade do sistema CTC-7 por fornecer água fria ou quente com compressão de ar.

A almofada de compressão cobre a almofada de água interna, de modo que a água fria ou quente possa fluir uniformemente de um lado para o outro sobre a lesão, e aderir mais de perto a almofada de água na pele através da compressão de ar periódica, para fazer um tratamento de frio ou calor mais efetivo. Além disso, a compressão automática e intervalo de tempo são aplicados de forma intermitente.



### ESPECIFICAÇÕES

- Alimentação: 100-240V CA, 50/60Hz
- Consumo de força: 250VA
- Modo: Frio, Calor e Contraste
- Temperatura:
  - Frio: 6 - 15°C ± 3°C
  - Quente: 35 - 45°C ± 3°C
- Intervalo de tempo:
  - Frio 5 - 60 min / Modo predefinido
  - Calor 5 - 30 min / Modo predefinido
- Dimensão: 27,2 (L) x 18,0 (P) x 23,9 (A) cm
- Peso (recipiente de água vazio): 3,7kg
- Peso (recipiente de água cheio): 3,9kg
- Líquido recomendado: Água destilada
- Capacidade de fluido: 200ml
- Tipo de proteção: IF IPX0
- Classe / tipo de proteção: Classe I, Tipo BF
- SEGURANÇA: IEC60601-1
- EMC INC 6050-1-7



DOCTOR LIFE®  
CTC-7



# LF900

## SISTEMA DE COMPRESSÃO PNEUMÁTICO



O que já era bom, ficou ainda melhor! O Sistema de Compressão Pneumático LF900 é um aprimoramento da versão LX9. Um equipamento mais completo, possui 4 modos principais permitindo a utilização de até dois componentes infláveis simultaneamente como bota, luva, cintura, ou calça. Auxilia na prevenção de problemas circulatórios, oferecendo tratamentos como: drenagem linfática, ativação da circulação, massagem muscular e lesões esportivas.

Possui também programação de terapia contínua para pós-operatório. As braçadeiras e perneiras são "overlapping" onde uma câmara se sobrepõe a anterior, melhorando o fluxo e evitando marcas na pele nos pontos entre as câmaras.

### DIFERENCIAIS LF900

- **Câmaras sobrepostas:** As perneiras ganharam câmaras que se sobrepõe a anterior, melhorando o fluxo e evitando marcas na pele nos pontos entre as câmaras
- **Programação para pós-operatório:** Terapia contínua, para ser usado no pós-operatório


### RECURSOS ESPECIAIS

- **Quatro modos de pressurização:** Existem quatro modos de pressurização que poderão ser escolhidos (A, B, C e D)
- **Seleção das câmaras:** O usuário poderá definir quais câmaras serão ativadas (**apenas no modo B**)
- **Ajuste de tempo:** Possibilidade de seleção do tempo de operação conforme as condições do paciente sob orientação médica
- **Botões de seleção com tela:** Permitem selecionar os modos de pressurização e as câmaras apenas com um leve toque na tela
- **Sensor de pressão digital:** O sensor de pressão manterá a pressão definida independentemente do tamanho do corpo do usuário
- **Timer digital:** Com o timer digital o usuário poderá definir o tempo de operação com mais precisão e conveniência
- **Segurança:** O ar dentro das câmaras será liberado automaticamente se ocorrer falta de energia

### MODOS DE OPERAÇÃO

#### MODO A (modo pré-terapia)

É usado principalmente para aliviar os nódulos linfáticos inguinais endurecidos em pacientes com linfedema crônico.

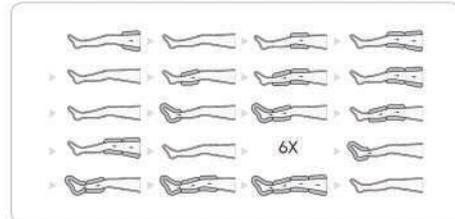


#### MODO B (modo linfático)

Este é o modo básico aplicado a pacientes com linfedema.




#### MODO C (modo intensivo distal)

Este é um modo linfático que se concentra no tratamento da área dos pés, para pacientes com linfedema com edema grave nos pés.

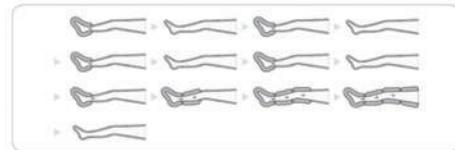

#### MODO D (modo de linfa suave)

Pacientes que sentem dor ou desconforto no tratamento do modo B, pele e tecido vascular enfraquecidos, devido ao envelhecimento ou edema crônico, podem usar o modo D para o tratamento suave da linfa.

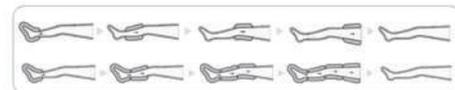

**DOCTOR LIFE®**  
**LF900**

#### CÂMARAS SOBREPOSTAS



# READYWRAP®

## ENVOLTÓRIO DE COMPRESSÃO AJUSTÁVEL

### Autocuidado em suas mãos

O seu **Envoltório de Compressão Ajustável**, o **ReadyWrap®**, agora é produzido no Brasil.

O ReadyWrap® é um envoltório de compressão de curto estiramento, ajustável através de tiras com velcros. Possui fácil manuseio. A sinalização dos velcros por cores e seu fechamento na parte frontal, facilitam seu uso, permitindo o autocuidado. Seu sistema de sobreposição garante cobertura de toda área aplicada, não deixando espaço entre as tiras, garantindo segurança e conforto ao paciente. São 6 peças destinadas aos membros inferiores (dedos do pé, pé e pé SL, panturrilha, joelho e coxa) e 2 peças para os membros superiores (luva e braço).

O ReadyWrap® também possui uma tira extensora de 10 cm que pode ser utilizada nas peças de pé, panturrilha, joelho e coxa, em casos de incompatibilidade de medidas, facilitando seu ajuste.

O ReadyWrap® é indicado para o tratamento compressivo de doenças como: Linfedema, Úlceras Venosas, Edema, Insuficiência Venosa, Fadiga e/ou Cansaço nas Pernas.



**VENOSAN®** MeLas Compressivas

# INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

CÓDIGO	MODELO - DEDOS DO PÉ	TAMANHO	MEDIDAS			APRESENTAÇÃO
			(cA)			
185004	ReadyWrap - Dedos do Pé - Pé esquerdo - Bege	P	18 - 20,4cm			Unidade
185002	ReadyWrap - Dedos do Pé - Pé esquerdo - Bege	M	20,5 - 23,5cm			Unidade
185000	ReadyWrap - Dedos do Pé - Pé esquerdo - Bege	G	23,6 - 26cm			Unidade
185006	ReadyWrap - Dedos do Pé - Pé esquerdo - Bege	XG	26,1 - 28,5cm			Unidade
185008	ReadyWrap - Dedos do Pé - Pé esquerdo - Bege	XXG	28,6 - 31cm			Unidade
185014	ReadyWrap - Dedos do Pé - Pé direito - Bege	P	18 - 20,4cm			Unidade
185012	ReadyWrap - Dedos do Pé - Pé direito - Bege	M	20,5 - 23,5cm			Unidade
185010	ReadyWrap - Dedos do Pé - Pé direito - Bege	G	23,6 - 26cm			Unidade
185016	ReadyWrap - Dedos do Pé - Pé direito - Bege	XG	26,1 - 28,5cm			Unidade
185018	ReadyWrap - Dedos do Pé - Pé direito - Bege	XXG	28,6 - 31cm			Unidade

CÓDIGO	MODELO - PÉ	TAMANHO	MEDIDAS			APRESENTAÇÃO
			(fAY)	(cY)	(cB)	
185024	ReadyWrap - Pé - Pé esquerdo - Bege	P	até 21cm	28 - 33cm	18 - 23cm	Unidade
185022	ReadyWrap - Pé - Pé esquerdo - Bege	M	até 23cm	30 - 38cm	20 - 28cm	Unidade
185020	ReadyWrap - Pé - Pé esquerdo - Bege	G	até 26cm	35 - 43cm	25 - 33cm	Unidade
185026	ReadyWrap - Pé - Pé esquerdo - Bege	XG	até 29cm	40 - 48cm	30 - 38cm	Unidade
185032	ReadyWrap - Pé - Pé direito - Bege	P	até 21cm	28 - 33cm	18 - 23cm	Unidade
185030	ReadyWrap - Pé - Pé direito - Bege	M	até 23cm	30 - 38cm	20 - 28cm	Unidade
185028	ReadyWrap - Pé - Pé direito - Bege	G	até 26cm	35 - 43cm	25 - 33cm	Unidade
185034	ReadyWrap - Pé - Pé direito - Bege	XG	até 29cm	40 - 48cm	30 - 38cm	Unidade

CÓDIGO	MODELO - PÉ SL	TAMANHO	MEDIDAS			APRESENTAÇÃO
			(fAY)	(cA')	(cB)	
185478	ReadyWrap - Pé SL - Pé esquerdo - Bege	P	16 - 19cm	21 - 24cm	18 - 23cm	Unidade
185450	ReadyWrap - Pé SL - Pé esquerdo - Bege	P	19 - 22cm	21 - 24cm	18 - 23cm	Unidade
185454	ReadyWrap - Pé SL - Pé esquerdo - Bege	M	16 - 19cm	25 - 28cm	20 - 28cm	Unidade
185458	ReadyWrap - Pé SL - Pé esquerdo - Bege	M	19 - 22cm	25 - 28cm	20 - 28cm	Unidade
185462	ReadyWrap - Pé SL - Pé esquerdo - Bege	G	16 - 19cm	29 - 32cm	25 - 33cm	Unidade
185466	ReadyWrap - Pé SL - Pé esquerdo - Bege	G	19 - 22cm	29 - 32cm	25 - 33cm	Unidade
185470	ReadyWrap - Pé SL - Pé esquerdo - Bege	XG	16 - 19cm	33 - 36cm	30 - 38cm	Unidade
185474	ReadyWrap - Pé SL - Pé esquerdo - Bege	XG	19 - 22cm	33 - 36cm	30 - 38cm	Unidade
185479	ReadyWrap - Pé SL - Pé direito - Bege	P	16 - 19cm	21 - 24cm	18 - 23cm	Unidade
185451	ReadyWrap - Pé SL - Pé direito - Bege	P	19 - 22cm	21 - 24cm	18 - 23cm	Unidade
185455	ReadyWrap - Pé SL - Pé direito - Bege	M	16 - 19cm	25 - 28cm	20 - 28cm	Unidade
185459	ReadyWrap - Pé SL - Pé direito - Bege	M	19 - 22cm	25 - 28cm	20 - 28cm	Unidade
185463	ReadyWrap - Pé SL - Pé direito - Bege	G	16 - 19cm	29 - 32cm	25 - 33cm	Unidade
185467	ReadyWrap - Pé SL - Pé direito - Bege	G	19 - 22cm	29 - 32cm	25 - 33cm	Unidade
185471	ReadyWrap - Pé SL - Pé direito - Bege	XG	16 - 19cm	33 - 36cm	30 - 38cm	Unidade
185475	ReadyWrap - Pé SL - Pé direito - Bege	XG	19 - 22cm	33 - 36cm	30 - 38cm	Unidade

CÓDIGO	MODELO - PANTURRILHA	TAMANHO	MEDIDAS			APRESENTAÇÃO
			(fBD)	(cB)	(cC)	
185044	ReadyWrap - Panturrilha - Bege	P	até 30cm	18 - 23cm	28 - 38cm	Unidade
185046	ReadyWrap - Panturrilha - Bege	P	até 35cm	18 - 23cm	28 - 38cm	Unidade
185040	ReadyWrap - Panturrilha - Bege	M	até 30cm	20 - 28cm	33 - 43cm	Unidade
185042	ReadyWrap - Panturrilha - Bege	M	até 35cm	20 - 28cm	33 - 43cm	Unidade
185036	ReadyWrap - Panturrilha - Bege	G	até 30cm	25 - 33cm	38 - 48cm	Unidade
185038	ReadyWrap - Panturrilha - Bege	G	até 35cm	25 - 33cm	38 - 48cm	Unidade
185048	ReadyWrap - Panturrilha - Bege	XG	até 30cm	30 - 38cm	43 - 58cm	Unidade
185050	ReadyWrap - Panturrilha - Bege	XG	até 35cm	30 - 38cm	43 - 58cm	Unidade
185118	ReadyWrap - Panturrilha - Bege	XXG	até 30cm	35 - 43cm	53 - 68cm	Unidade
185120	ReadyWrap - Panturrilha - Bege	XXG	até 35cm	35 - 43cm	53 - 68cm	Unidade

CÓDIGO	MODELO - JOELHO	TAMANHO	MEDIDAS		APRESENTAÇÃO
			(cD)	(cE)	
185056	ReadyWrap - Joelho - Bege	P	28 - 38cm	38 - 48cm	Unidade
185054	ReadyWrap - Joelho - Bege	M	33 - 43cm	45 - 58cm	Unidade
185052	ReadyWrap - Joelho - Bege	G	38 - 48cm	52 - 68cm	Unidade
185058	ReadyWrap - Joelho - Bege	XG	43 - 58cm	59 - 78cm	Unidade
185122	ReadyWrap - Joelho - Bege	XXG	53 - 68cm	66 - 88cm	Unidade

CÓDIGO	MODELO - COXA	TAMANHO	MEDIDAS			APRESENTAÇÃO
			(fEG)	(cE)	(cG)	
185068	ReadyWrap - Coxa - Bege	P	até 25cm	38 - 48cm	48 - 63cm	Unidade
185070	ReadyWrap - Coxa - Bege	P	até 30cm	38 - 48cm	48 - 63cm	Unidade
185064	ReadyWrap - Coxa - Bege	M	até 25cm	45 - 58cm	58 - 73cm	Unidade
185066	ReadyWrap - Coxa - Bege	M	até 30cm	45 - 58cm	58 - 73cm	Unidade
185060	ReadyWrap - Coxa - Bege	G	até 25cm	52 - 68cm	68 - 83cm	Unidade
185062	ReadyWrap - Coxa - Bege	G	até 30cm	52 - 68cm	68 - 83cm	Unidade
185072	ReadyWrap - Coxa - Bege	XG	até 25cm	59 - 78cm	78 - 93cm	Unidade
185074	ReadyWrap - Coxa - Bege	XG	até 30cm	59 - 78cm	78 - 93cm	Unidade
185124	ReadyWrap - Coxa - Bege	XXG	até 25cm	66 - 88cm	88 - 103cm	Unidade
185126	ReadyWrap - Coxa - Bege	XXG	até 30cm	66 - 88cm	88 - 103cm	Unidade

CÓDIGO	MODELO - BRAÇO	TAMANHO	MEDIDAS				APRESENTAÇÃO
			(fBG)	(cB)	(cE)	(cG)	
185104	ReadyWrap - Braço - Bege	P	até 43cm	13,5 - 17cm	19 - 26cm	22 - 29cm	Unidade
185106	ReadyWrap - Braço - Bege	P	até 46cm	13,5 - 17cm	19 - 26cm	22 - 29cm	Unidade
185108	ReadyWrap - Braço - Bege	P	até 49cm	13,5 - 17cm	19 - 26cm	22 - 29cm	Unidade
185098	ReadyWrap - Braço - Bege	M	até 43cm	15,5 - 20cm	24 - 33cm	26 - 36cm	Unidade
185100	ReadyWrap - Braço - Bege	M	até 46cm	15,5 - 20cm	24 - 33cm	26 - 36cm	Unidade
185102	ReadyWrap - Braço - Bege	M	até 49cm	15,5 - 20cm	24 - 33cm	26 - 36cm	Unidade
185092	ReadyWrap - Braço - Bege	G	até 43cm	17,5 - 23cm	29 - 40cm	31 - 43cm	Unidade
185094	ReadyWrap - Braço - Bege	G	até 46cm	17,5 - 23cm	29 - 40cm	31 - 43cm	Unidade
185096	ReadyWrap - Braço - Bege	G	até 49cm	17,5 - 23cm	29 - 40cm	31 - 43cm	Unidade
185110	ReadyWrap - Braço - Bege	XG	até 43cm	19,5 - 26cm	30 - 43cm	36 - 50cm	Unidade
185112	ReadyWrap - Braço - Bege	XG	até 46cm	19,5 - 26cm	30 - 43cm	36 - 50cm	Unidade
185114	ReadyWrap - Braço - Bege	XG	até 49,5cm	19,5 - 26cm	30 - 43cm	36 - 50cm	Unidade

CÓDIGO	MODELO - LUVA	TAMANHO	MEDIDAS			APRESENTAÇÃO
			(fAB)	(cB)	(cA)	
185080	ReadyWrap - Luva - Mão esquerda - Bege	P	até 12,5cm	13,5 - 17cm	18 - 20cm	Unidade
185078	ReadyWrap - Luva - Mão esquerda - Bege	M	até 13,5cm	15,5 - 20cm	20 - 22cm	Unidade
185076	ReadyWrap - Luva - Mão esquerda - Bege	G	até 14,5cm	17,5 - 23cm	22 - 24cm	Unidade
185082	ReadyWrap - Luva - Mão esquerda - Bege	XG	até 15,5cm	19,5 - 26cm	24 - 26cm	Unidade
185088	ReadyWrap - Luva - Mão direita - Bege	P	até 12,5cm	13,5 - 17cm	18 - 20cm	Unidade
185086	ReadyWrap - Luva - Mão direita - Bege	M	até 13,5cm	15,5 - 20cm	20 - 22cm	Unidade
185084	ReadyWrap - Luva - Mão direita - Bege	G	até 14,5cm	17,5 - 23cm	22 - 24cm	Unidade
185090	ReadyWrap - Luva - Mão direita - Bege	XG	até 15,5cm	19,5 - 26cm	24 - 26cm	Unidade

CÓDIGO	MODELO - TIRA EXTENSORA	MEDIDAS		APRESENTAÇÃO
		Comprimento	Altura	
185116	ReadyWrap - Tira Ajustável de Extensão - Bege	18cm	10cm	Unidade

# PERFEKTA® SUPER

## ATADURA DE LONGA ELASTICIDADE

Perfekta® Super é uma atadura que se ajusta bem ao formato do corpo devido ao seu tecido macio. É de longa elasticidade, com alta pressão de repouso, sendo necessário sua remoção antes do sono e repouso. É composta de algodão, poliamida e elastano, de forte compressão e com uma extensibilidade de aproximadamente 160%. Perfekta® Super é fácil de lavar e limpar, além disso, devido a sua facilidade de uso, pode ser aplicada por pessoas com pouca experiência.

### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação
185931	8cm x 5m	Bandagem de longa elasticidade	Unidade
185932	10cm x 5m	Bandagem de longa elasticidade	Unidade
185933	12cm x 5m	Bandagem de longa elasticidade	Unidade

Produto cadastrado na ANVISA nº: 10349310041

Validade: 5 anos após data de fabricação



# VARICEX® S

## BANDAGEM COM PASTA ÓXIDO DE ZINCO

Varicex® S é uma Bota de Unna impregnada com óxido de zinco, pronta para uso, que permite uma economia de tempo na sua aplicação. É composta de viscose e poliamida e impregnada com pasta 100% óxido de zinco branca. Possui extensibilidade no comprimento e na largura o que permite uma modelagem justa no membro, sem dobras e sem a necessidade de ser cortada em vários pontos. Varicex® S produz moldes semirrígidos, com um ótimo efeito descongestionante. É destinada ao enfaixamento compressivo no tratamento da tromboflebite, edemas, insuficiência venosa crônica e úlcera venosa.

### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação
20636	10cm x 7m	Bandagem de óxido de zinco	Unidade
20637	10cm x 10m	Bandagem de óxido de zinco	Unidade

Produto cadastrado na ANVISA nº: 80102511872

Validade: 3 anos após data de fabricação



# ROSIDAL® K

## BANDAGEM DE CURTA ELASTICIDADE

Rosidal® K é uma atadura têxtil elástica de alta compressão e de curto estiramento, que exerce uma alta pressão de trabalho, assegurando a compressão do sistema venoso profundo conforme o paciente se movimentar. É composta de 100% algodão, fácil de lavar e de limpar. Rosidal® K é indicada para enfaixamento compressivo na flebologia, no tratamento de linfedema agudo e crônico e no suporte e alívio de pressão na traumatologia e na medicina esportiva.



### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação
22199	4cm x 5m	Bandagem de curta elasticidade	Unidade
22200	6cm x 5m	Bandagem de curta elasticidade	Unidade
22201	8cm x 5m	Bandagem de curta elasticidade	Unidade

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação
22202	10cm x 5m	Bandagem de curta elasticidade	Unidade
22203	12cm x 5m	Bandagem de curta elasticidade	Unidade
22251	10cm x 5m	Bandagem de curta elasticidade	Cx. com 10 unid.

Produto cadastrado na ANVISA nº: 80102511471

Validade: 5 anos após data de fabricação

# ROSIDAL® SOFT

## BANDAGEM DE ESPUMA DE POLIURETANO

Rosidal® Soft é uma bandagem de espuma branca, fina, porosa, leve e elástica. É composta de espuma de poliuretano à base de poliéster, livre de látex, que não agride a pele e permite a passagem de ar e de vapor d'água. Rosidal® Soft tem um material extremamente estável, com alta resistência têxtil e ótima resistência à abrasão e à propagação de rasgos. É indicada para recobrir membros sob bandagens compressivas, a fim de garantir um acolchoamento adequado na linfologia e flebologia.



### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação
23110	10cm x 0,3cm x 2,5m	Bandagem de espuma	Unidade
23111	10cm x 0,4cm x 2,5m	Bandagem de espuma	Unidade
23112	12cm x 0,4cm x 2,5m	Bandagem de espuma	Unidade
23113	15cm x 0,4cm x 2,5m	Bandagem de espuma	Unidade

Produto cadastrado na ANVISA nº: 80102511469

Validade: 3 anos após data de fabricação

# ROSIDAL® TCS

## SISTEMA DE COMPRESSÃO DE DOIS COMPONENTES

O Rosidal® TCS é um sistema de compressão de dois componentes seguro e de fácil aplicação. Devido à tecnologia Safe-Loc, promove compressão terapêutica a partir do alongamento completo da bandagem. A baixa pressão de repouso exercida é uma nítida vantagem em termos de aceitação do tratamento, sobretudo à noite.

Rosidal® SC (Compressão Suave) é uma bandagem compressiva acolchoada, feita de espuma de poliuretano laminada com tecido de poliamida e algodão, que serve para proteção cutânea antes da aplicação do segundo componente.

Rosidal® CC (Compressão Coesiva) é uma bandagem de compressão coesiva de curta elasticidade, feita com tecido de poliamida, poliuretano e algodão, revestido por borracha sintética sem látex natural.



### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Apresentação
26484	Componente 1: Rosidal SC 10cm x 3,5m Componente 2: Rosidal CC 10cm x 6m	Unidade

Produto cadastrado na ANVISA nº: 80102511484

Validade: 3 anos após data de fabricação

# TG® BANDAGEM TUBULAR

## MALHA TUBULAR

tg® Bandagem Tubular é uma malha fina compatível com a pele que se acomoda facilmente no corpo. É composta de algodão e viscose, podendo se expandir em até quatro vezes sua largura original. tg® Bandagem Tubular é indicada para a fixação de curativos, proteção da pele em enfaixamentos compressivos, sob gessos e moldes sintéticos. Se necessário, ela pode ser esterilizada a vapor de acordo com a DIN EN ISO 17665-1.



### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação
24005	7cm x 20m	Bandagem tubular	Unidade
24007	12cm x 20m	Bandagem tubular	Unidade
24023	5,5cm x 5m	Bandagem tubular	Unidade

Produto cadastrado na ANVISA nº: 80102511881

Validade: 5 anos após data de fabricação

# MOLLELAST®

## BANDAGEM DE FIXAÇÃO ELÁSTICA NÃO COESIVA

É uma bandagem conformável, não deslizante e elástica. Na sua aplicação, evita enrugamentos e constrictões, especialmente em partes cônicas do corpo e articulações. É composta de viscosa e poliamida, com técnica especial de tricotagem, é permeável ao ar, fácil de manusear e confortável para a pele. Indicada para a compressão suave na linfologia, principalmente no enfaixamento dos dedos da mão e do pé e para a fixação de curativos.



### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação
14410	4cm x 4m	Bandagem de fixação elástica	Unidade
14411	6cm x 4m	Bandagem de fixação elástica	Unidade
19410	4cm x 4m	Bandagem de fixação elástica	Cx. com 20 unid.
19411	6cm x 4m	Bandagem de fixação elástica	Cx. com 20 unid.

Produto cadastrado na ANVISA nº: 10349310043

Validade: 5 anos após data de fabricação

# MOLLELAST® HAFT LATEX-FREE

## BANDAGEM COESIVA CONFORMÁVEL COM DUPLO ESTIRAMENTO

Mollelast® é uma bandagem coesiva conformável com duplo estiramento no sentido longitudinal e transversal que proporciona um bom ajuste nos membros de forma cônica, retendo os curativos firmemente, inclusive sobre articulações. É composta de viscosa e poliamida, livre de látex, com fina tricotagem que a torna permeável ao ar e não prejudica a pele. O acabamento coesivo faz com que a bandagem fixe em si mesma a cada volta, e não à pele nem aos pelos, dispensando o uso de fixação para prendê-la. Mollelast® é indicada para fixação de curativos e cânulas e/ou para fins de compressão.



### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação
89595	4cm x 20m	Mollelast Haft Latex Free	Unidade
89598	10cm x 20m	Mollelast Haft Latex Free	Unidade
89593	10cm x 4m	Mollelast Haft Latex Free	Unidade

Produto cadastrado na ANVISA nº: 80102511589

Validade: 3 anos após data de fabricação

## ESPUMA DE BORRACHA PARA O ACOLCHOAMENTO SOB BANDAGENS

Kompresx® é um produto de espuma de borracha que apresenta vários tamanhos e formatos prontos para uso (placa, bandagens e manta). É composto de borracha sintética (estireno-butadieno), com material microporoso e superfície aveludada, sendo permeável ao ar e ao vapor d'água. É utilizado na compressão e no tratamento de edema na flebologia, linfologia e na medicina esportiva com uso de bandagens funcionais. Também é usada para acolchoamento parcial sob bandagens, bem como para aumentar a compressão abaixo das bandagens na linfologia. Kompresx® bandagens, são indicadas também, nos casos de edemas graves e tromboflebites, bem como após uma escleroterapia extensa.



### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação
22313	8cm x 2m x 0,5cm	Espuma de borracha	Unidade
22314	8cm x 2m x 1cm	Espuma de borracha	Unidade
22320	100cm x 50cm x 1cm	Espuma de borracha	Unidade
22301	9cm x 5cm x 1cm	Espuma de borracha	Unidade

Produto cadastrado na ANVISA nº: 80102511592

Validade: 5 anos após data de fabricação

## LINHA DE BANDAGENS




**LÍDER EM**  
**COMPRESSÃO**  
**E TRATAMENTO**  
**DE FERIDAS**

**Lohmann & Rauscher**


Os suportes e órteses Cellacare® CLASSIC são uma linha de produtos com alto padrão de qualidade. Graças as melhores matérias-primas e a tecnologia de ponta usada na sua fabricação, proporcionando um elevado nível de eficácia. A linha Cellacare® é feita com malha tricotada com efeito compressivo, utilizada na compressão e sustentação das articulações. Possui efeito de massagem intermitente, de uso bilateral com design simétrico modelado anatomicamente, atendendo os consumidores mais exigentes. Mais confortáveis, discretos e com proteção ativa, a escolha ideal para quem pratica esportes de leve e alto impacto, lazer ou no uso diário.




PONTOS DE MEDIÇÃO  
**JOELHEIRA GENU**

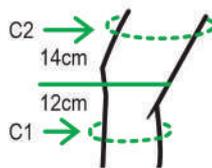

PONTOS DE MEDIÇÃO  
**TORNOZELEIRA MALLEO**

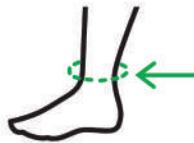

PONTOS DE MEDIÇÃO  
**COTOVELEIRA EPI**

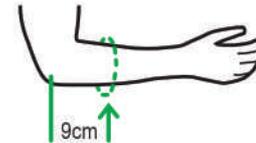

### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

#### CELLACARE® GENU CLASSIC - JOELHEIRA ORTOPÉDICA

Código	Descritivo	Tamanho	Medida
106001	Cellacare® Genu CLASSIC - Joelheira ortopédica	P - 1	C1: 28cm - 32cm C2: 38cm - 42cm
106002	Cellacare® Genu CLASSIC - Joelheira ortopédica	M - 2	C1: 32cm - 36cm C2: 42cm - 46cm
106003	Cellacare® Genu CLASSIC - Joelheira ortopédica	G - 3	C1: 36cm - 40cm C2: 46cm - 50cm
106004	Cellacare® Genu CLASSIC - Joelheira ortopédica	XG - 4	C1: 40cm - 44cm C2: 50cm - 54cm
106005	Cellacare® Genu CLASSIC - Joelheira ortopédica	XXG - 5	C1: 44cm - 48cm C2: 54cm - 58cm

Produto cadastrado na ANVISA nº: 10349310031

#### CELLACARE® MALLEO CLASSIC - TORNOZELEIRA ORTOPÉDICA

Código	Descritivo	Tamanho	Medida
107001	Cellacare® Malleo CLASSIC - Tornozela ortopédica	P - 1	18cm - 21cm
107002	Cellacare® Malleo CLASSIC - Tornozela ortopédica	M - 2	21cm - 24cm
107003	Cellacare® Malleo CLASSIC - Tornozela ortopédica	G - 3	24cm - 27cm
107004	Cellacare® Malleo CLASSIC - Tornozela ortopédica	XG - 4	27cm - 30cm

Produto cadastrado na ANVISA nº: 10349310030

#### CELLACARE® EPI CLASSIC - COTOVELEIRA ORTOPÉDICA

Código	Descritivo	Tamanho	Medida
108001	Cellacare® Epi CLASSIC - Cotovela ortopédica	P - 1	19cm - 21cm
108002	Cellacare® Epi CLASSIC - Cotovela ortopédica	M - 2	21cm - 23cm
108003	Cellacare® Epi CLASSIC - Cotovela ortopédica	G - 3	23cm - 26cm
108004	Cellacare® Epi CLASSIC - Cotovela ortopédica	XG - 4	26cm - 29cm
108005	Cellacare® Epi CLASSIC - Cotovela ortopédica	XXG - 5	29cm - 32cm

Produto cadastrado na ANVISA nº: 10349310029

# LINHA DE CURATIVOS



# DEBRISOFT® PAD

## ALMOFADA DE FIBRAS MONOFILAMENTARES PARA LIMPEZA E DESBRIDAMENTO ESTÉRIL

Debrisoft® Pad é uma almofada para desbridamento mecânico fácil, eficaz e praticamente indolor. Com apenas alguns minutos de uso (2 a 4 min.), produz resultados visivelmente incríveis. O Debrisoft® Pad é composto de fibras monofilamentares de poliéster, patenteadas, que promovem limpeza e desbridamento de tecidos inviáveis, exsudato e agentes contaminantes como bactérias e biofilmes. Através de movimentos circulares, fixa os debrís nas fibras espessas e remove-os da ferida de forma suave e efetiva.

Desbridamento com Debrisoft® Pad significa: Limpeza e desbridamento altamente eficaz, que acelera o processo de cicatrização da ferida, de forma praticamente indolor ao paciente.



### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação	
34322	10cm x 10cm	Almofada para limpeza e desbridamento	Cx. com 5 unidades	ESTÉRIL
136323	13cm x 20cm	Almofada para limpeza e desbridamento	Cx. com 5 unidades	ESTÉRIL

Produto cadastrado na ANVISA nº: 80102512177

Validade: 5 anos após data de fabricação

# SUPRASORB® X + PHMB

## CURATIVO ANTIMICROBIANO HYDROBALANCE

Suprasorb® X + PHMB é um curativo inteligente com ação antimicrobiana sobre um largo espectro de patógenos e com tecnologia *HydroBalance*. De acordo com o estado da lesão, promove umidade ou absorve o excesso de exsudado da ferida, conseguindo obter um ambiente úmido ideal para a cicatrização. Suprasorb® X + PHMB é composto de celulose, água e 0,3% de Polihexametileno Biguanida (PHMB), que permite uma fácil adaptação do curativo a qualquer forma ou profundidade da ferida, sendo especialmente adequado para partes do corpo de difícil acesso. O ambiente úmido e o efeito refrescante causam uma sensação agradável e calmante aos pacientes.

Suprasorb® X+PHMB é indicado para a cicatrização de feridas, podendo ser usado naquelas com risco de infecção ou nas infectadas, com exsudação leve a moderada, em tecidos de granulação e nas feridas superficiais ou profundas.



### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação	
20541	9cm x 9cm	Cobertura antimicrobiana hidrobalanceada	Cx. com 05 unidades	ESTÉRIL
20542	14cm x 20cm	Cobertura antimicrobiana hidrobalanceada	Cx. com 05 unidades	ESTÉRIL

Registro na ANVISA nº: 80102511874

Validade: 3 anos após data de fabricação

# SUPRASORB® A+Ag

## CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO COM PRATA

Suprasorb® A+Ag é um curativo de alginato de cálcio natural com um amplo espectro de ação antimicrobiana que limpa a ferida e reduz a carga bacteriana. Suprasorb® A+Ag é composto de fibras de alginato de cálcio e fibras de alginato de prata (1,5% de prata iônica) que são liberadas em contato com o exsudato ou o sangue, agindo diretamente no leito da ferida graças à gelificação promovida pelo alginato de cálcio. As bactérias e outros germes presentes na ferida ficam presos no gel, sendo aniquilados com a troca do curativo.

Suprasorb® A+Ag é indicado para as feridas que apresentam forte exsudação, as infectadas ou sob risco de infecção, sendo eficaz também nos casos de **SARM\*** e **ERV\***.

\* *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina (SARM)

\* *Enterococo* resistente à vancomicina (ERV)



### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação	
20571	10cm x 10cm	Curativo de alginato de cálcio com prata	Cx. com 10 unidades	ESTÉRIL
20573	30cm x 2g	Fita de alginato de cálcio com prata	Cx. com 5 unidades	ESTÉRIL


Registro na ANVISA nº: 80102511880

Validade: 3 anos após data de fabricação

# VLIWAKTIV® Ag

## CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO ABSORVENTE COM PRATA

Vliwaktiv® Ag é composto por uma cobertura de material não tecido que não adere à ferida e fibras de carvão ativado impregnadas com prata. Em contato com a lesão, prende o odor e o exsudato no curativo e retém as endotoxinas liberadas pelas bactérias. Vliwaktiv® Ag não deve ser recortado e é indicado para feridas com presença de odor, de leve a alta quantidade de exsudato, criticamente colonizadas e infectadas, e para aquelas com grande risco de infecção.

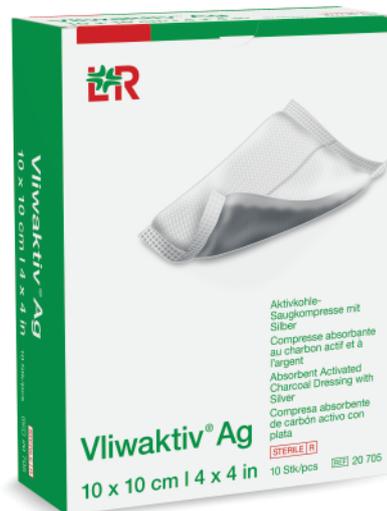

### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação	
20705	10cm x 10cm	Curativo de carvão absorvente com prata	Cx. com 10 unidades	ESTÉRIL

Registro na ANVISA nº: 80102512566

Validade: 5 anos após data de fabricação

# SUPRASORB® A

## CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO

Suprasorb® A é um curativo de alginato de cálcio que cria um ambiente limpo nas feridas altamente exsudativas. Suprasorb® A é composto de fibras de alginato de cálcio, derivado das algas marinhas marrons, que apresentam uma rápida formação de gel pela troca de íons de cálcio do curativo com os íons de sódio do exsudato da ferida. O gel que se forma com o exsudato prende as bactérias e debris teciduais que são removidos junto com as fibras de alginato. Suprasorb® A possui alta capacidade de absorver grandes volumes do exsudato, tem ação hemostática, é macio, podendo ser colocado facilmente sobre as feridas e adaptando-se a qualquer tipo de leito (superficial e cavitária).



### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação	
20440	5cm x 5cm	Curativo de alginato de cálcio	Cx. com 10 unidades	ESTÉRIL
20441	10cm x 10cm	Curativo de alginato de cálcio	Cx. com 10 unidades	ESTÉRIL
20445	30cm x 2g	Fita de alginato de cálcio	Cx. com 5 unidades	ESTÉRIL

Registro na ANVISA nº: 80102511877

Validade: 5 anos após data de fabricação

# SUPRASORB® LIQUACEL

## CURATIVO DE HIDROFIBRA

Suprasorb® Liquacel é um curativo de hidrofibra (fibras hidroativas), macio e de alta capacidade de absorção. Em contato com o exsudato da ferida, forma um gel que mantém um ambiente úmido, podendo também auxiliar no desbridamento autolítico. Com a formação do gel, é possível aprisionar na placa o exsudato, debris e bactérias que se encontram na ferida, sendo removidos na troca do curativo. Suprasorb® Liquacel apresenta absorção vertical do exsudato, isso traz uma proteção à pele perilesão e bordas da ferida, reduzindo o risco de maceração e promovendo a cicatrização. Mesmo quando úmido, suas fibras em gel permitem a remoção completa do curativo e de forma atraumática. Suprasorb® Liquacel é indicado para o tratamento de feridas agudas e crônicas que apresentam grandes volumes de exsudato e também utilizado para preencher feridas profundas.



### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação	
33436	10cm x 10cm	Curativos de hidrofibra	Cx. com 10 unidades	ESTÉRIL

Registro na ANVISA nº: 80102512038

Validade: 3 anos após data de fabricação

# SUPRASORB® H

## CURATIVO DE HIDROCOLOIDE PARA FERIDAS

Suprasorb® H é um curativo de hidrocoloide auto-adesivo, produzido a partir de substâncias hidrocoloides naturais que são aplicadas a um filme de poliuretano. É composto de carboximetilcelulose, resinas e óleo mineral, que criam um ambiente úmido ideal nas feridas com leve a moderada exsudação. Em contato com o exsudato, forma um gel que permite ao curativo se moldar à estrutura da ferida, não danificando os tecidos recém formados ao remover. Suprasorb® H Standard e Suprasorb® H Thin, são os dois modelos disponíveis, considerados especialmente finos e flexíveis, diferenciando-os quanto a espessura do curativo e a capacidade de absorver o exsudato. Suprasorb® H é fácil e seguro de usar devido as suas propriedades adesivas, com a vantagem de repelir bactérias e fluidos, permitindo que os pacientes molhem o curativo sem problemas.

### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação	
20403	10cm x 10cm	Curativo de hidrocoloide regular	Cx. com 10 unidades	ESTÉRIL
20414	20cm x 20cm	Curativo de hidrocoloide fino	Cx. com 5 unidades	ESTÉRIL
20430	14cm x 16cm	Curativo de hidrocoloide regular sacro	Cx. com 5 unidades	ESTÉRIL

Registro na ANVISA nº: 80102511879

Validade: 5 anos após data de fabricação



# METALLINE®

## CURATIVO ESPECIAL MULTICAMADAS

Metalline® é um curativo de apresentações variadas, com três ou quatro camadas, sendo permeáveis ao ar e ao vapor, fino, suave sobre a pele e com boa absorção. É composto de tecido não tecido de viscose, com uma camada de vapor de alumínio que promove a não aderência à pele ou à ferida e trocas de curativo atraumáticas.

**Metalline® para feridas** é um curativo para qualquer tipo de ferida, tem a função de absorver o exsudato e proteger o tecido, sendo particularmente recomendado para: abrasões, queimaduras, feridas cirúrgicas e no tratamento inicial ou final de feridas.

**Metalline® para drenos, traqueostomias e gastrostomias**, é destinado para a proteção da pele ao redor do dispositivo e para absorção de secreção. Já vem com orifício e janela, trazendo maior facilidade na aplicação e segurança para o paciente.

**Metalline® lençol**, apresenta quatro camadas, com a finalidade de ser colocado sob os pacientes submetidos a tratamentos de feridas abertas em casos de queimaduras extensas, cauterizações e abrasões.

### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação	
23050	73cm x 2,5m	Lençol aluminizado absorvente	Unidade	ESTÉRIL
23081	8cm x 10cm	Curativo aluminizado absorvente	Cx. com 50 unidades	ESTÉRIL
23082	10cm x 12cm	Curativo aluminizado absorvente	Cx. com 50 unidades	ESTÉRIL
23087	10cm x 20cm	Curativo aluminizado absorvente	Cx. com 50 unidades	ESTÉRIL
23093	6cm x 7cm	Curativo aluminizado absorvente para dreno	Cx. com 50 unidades	ESTÉRIL
23094	8cm x 9cm	Curativo aluminizado abs. para traqueóstomo	Cx. com 50 unidades	ESTÉRIL

Registro na ANVISA nº: 80102511882

Produto cadastrado na ANVISA nº: 80102511873

Validade: 5 anos após data de fabricação



# LOMATUELL® H

## GAZE NÃO ADERENTE VASELINADA

Lomatuell® H é um curativo de gaze vaselinada pronto para uso. É composto por uma rede de tule de algodão impregnada com parafina branca, sendo destinado ao tratamento suave de feridas superficiais e proteção de estruturas e tecidos. O tule de malha larga favorece a drenagem do exsudato e a troca gasosa com o meio. A vaselina presente no Lomatuell® H evita a aderência à ferida, tornando as trocas dos curativos menos dolorosas e por ser neutra, pode-se adicionar outra cobertura sem risco de interação.



### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação	
23314	5cm x 5cm	Cobertura de gaze parafinada	Cx. com 10 unidades	ESTÉRIL
23317	10cm x 30cm	Cobertura de gaze parafinada	Cx. com 10 unidades	ESTÉRIL
23318	10cm x 10cm	Cobertura de gaze parafinada	Cx. com 50 unidades	ESTÉRIL

Registro na ANVISA nº: 80102511875

Validade: 5 anos após data de fabricação

# LOMATUELL® PRO

## GAZE VASELINADA NÃO ADERENTE COM PARTÍCULAS DE HIDROCOLOIDE

Lomatuell® Pro é um curativo de gaze não aderente, flexível e macio. É composto por tule sintético de poliéster de malha larga, impregnado com matriz polimérica contendo vaselina e hidrocoloide. Em contato com o exsudato da ferida, as partículas de hidrocoloide formam um gel e em conjunto com a vaselina, constituem uma camada anfifílica (hidrofílica-lipofílica) acelerando o processo de cicatrização.

Lomatuell® Pro é indicado para feridas superficiais agudas, crônicas (ex. úlcera de perna, úlcera do pé diabético e lesão por pressão), queimaduras e feridas cirúrgicas que tenham qualquer nível de exsudato.



### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação	
30871	10cm x 10cm	Malha de contato gelificante para feridas	Cx. com 10 unidades	ESTÉRIL

Registro na ANVISA nº: 80102512631

Validade: 3 anos após data de fabricação

# SUPRASORB® F

## CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE

Suprasorb® F é um curativo de filme transparente, resistente a rasgos, que fornece proteção à pele e ao curativo primário. É composto de filme de poliuretano com adesivo de poliacrilato e livre de látex. Considerado um curativo semipermeável, permite a troca de calor e gás, criando um ambiente propício para a cicatrização da ferida e é impermeável a fluidos que protege a ferida ou o local de punção contra a colonização bacteriana do exterior. É extremamente fino, flexível e muito fácil de usar, possui uma tira de papel que está aderida longitudinalmente no centro do papel para auxiliar na aplicação. Suprasorb® F está disponível como curativo estéril e não estéril (em rolo). É resistente a antissépticos à base de álcool, iodo e octenidina.



### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação	
20468	10cm x 10m	Curativo de filme transparente rolo	Unidade	
20469	15cm x 10m	Curativo de filme transparente rolo	Unidade	
20461	5cm x 7cm	Curativo de filme transparente	Cx. com 100 unidades	ESTÉRIL
20463	10cm x 12cm	Curativo de filme transparente	Cx. com 50 unidades	ESTÉRIL
20464	10cm x 25cm	Curativo de filme transparente	Cx. com 10 unidades	ESTÉRIL
20465	15cm x 20cm	Curativo de filme transparente	Cx. com 10 unidades	ESTÉRIL
20466	20cm x 30cm	Curativo de filme transparente	Cx. com 10 unidades	ESTÉRIL

Registro na ANVISA - Estéril nº: 80102511451

Registro na ANVISA - Não Estéril nº: 80102511452

Validade: 5 anos após data de fabricação

# CURAFIX® H

## FITA ADESIVA PARA FIXAÇÃO

Curafix® H é uma fita adesiva elástica, livre de látex, composta por tecido não tecido de poliéster e adesivo de acrilato. É permeável ao vapor d'água, com boa aderência à pele, ideal para fixação de curativos em áreas do corpo que estão em frequentes movimentos, por exemplo, articulações e pescoço. Adequado também para fixação de tubos de drenagem, catéteres e sondas.



### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação
138941	5cm x 10m	Fita cirúrgica	Unidade
138942	10cm x 10m	Fita cirúrgica	Unidade

Produto cadastrado na ANVISA nº: 10349310045

Validade: 5 anos após data de fabricação

# LINHA DE SUPORTES E ÓRTESES ORTOPÉDICAS

*Lenox*<sup>®</sup>



*Lenox*  
SUPORTES E ÓRTESES  
ORTOPÉDICAS

# LENOX® LINHA CRISTAL

## PALMILHA INTEIRA DE GEL POLÍMERO COM OU SEM OGIVA METATARSAL

Discretas e transparentes, as Palmilhas de Gel Polímero da Linha Lenox® Cristal, previnem e auxiliam no tratamento da fascite plantar, aliviam a dor (metatarsalgia) e absorvem parte do impacto da caminhada protegendo as articulações. Mantém a pele que está em contato hidratada. A ogiva é um ponto de pressão que auxilia o retorno venoso. Produto hipoalergênico.



### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

COM OGIVA	SEM OGIVA		
Código	Código	Tamanho	Cor
8370	8360	33/34	Azul
8371	8361	35/36	Azul
8372	8362	37/38	Azul
8373	8363	39/40	Azul
8374	8364	41/42	Azul
8375	8365	43/45	Azul



Produto cadastrado na ANVISA nº 10349310036

# LENOX® LINHA CONFORT

## PALMILHA AMORTECEDORA DE GEL

Desenhada para absorver o impacto de grau médio produzido no andar, ideal para substituir a palmilha no interior de qualquer calçado. Reduz a pressão sobre a zona do metatarso e calcanhar. Elaborado em três opções diferentes: revestimento toalha, camurçado e esportiva, de gel puro hidratante sem revestimento. Produto Hipoalergênico.



### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Descritivo
8500	P - 35/36	Esportiva
8501	M - 37/39	Esportiva
8502	G - 40/42	Esportiva

Produto cadastrado na ANVISA nº 10349310013

Código	Tamanho	Descritivo
8503	P - 35/36	Toalha
8504	M - 37/39	Toalha
8505	G - 40/42	Toalha

Produto cadastrado na ANVISA nº 10349310013

Código	Tamanho	Descritivo
8515	P - 35/36	Camurçado
8516	M - 37/39	Camurçado
8517	G - 40/42	Camurçado

Produto cadastrado na ANVISA nº 10349310014

## PALMILHA UNIVERSAL CONFORT DE GEL

Desenhada para absorver o impacto de baixo grau de produção ao andar. Ideal para encaixar-se perfeitamente em qualquer calçado. Reduz a pressão sobre a zona do metatarso e calcanhar. Elaborado em três opções diferentes: revestido em tecido toalha, esportiva e camurçado, de gel puro-hidratante sem revestimento. Totalmente recortável para adaptar-se ao calçado. Produto Hipoalergênico.



### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Descritivo
8550	Tamanho único 35/42	Esportiva

Produto cadastrado na ANVISA nº 10349310013

Código	Tamanho	Descritivo
8554	Tamanho único 35/42	Camurçado

Produto cadastrado na ANVISA nº 10349310014

Código	Tamanho	Descritivo
8551	Tamanho único 37/42	Toalha

Produto cadastrado na ANVISA nº 10349310013

# LENOX® LINHA GELASTIC

## PALMILHA INTEIRA DE GEL SEM OU COM OGIVA METATARSAL

Elaborado em gel polímero de última geração. Possui orifícios localizados para troca de vapor da pele com o meio externo. Desenhado para aliviar a pressão do calcanhar em toda a zona metatarsiana.

Tem grande elasticidade, pode ser recortada para um ajuste melhor no calçado. Produto especialmente desenhado para pé diabético. Produto Hipoalergênico.

### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

#### SEM OGIVA

Código	Tamanho	Descritivo
8291	I - P - 35/36	Extra soft
8292	II - M - 37/38	Extra soft
8293	III - G - 39/40	Extra soft
8294	IV - XG - 41/42	Extra soft

#### COM OGIVA

Código	Tamanho	Descritivo
8279	I - P - 35/36	Extra soft
8280	II - M - 37/38	Extra soft
8281	III - G - 39/40	Extra soft
8282	IV - XG - 41/42	Extra soft

Produto cadastrado na ANVISA nº 10349310004



## CALCANHEIRA DE GEL PARA ESPORÃO CALCÂNEO

Elaborada para isolar a pressão na área do esporão, evitando dores e incômodos. Alivia a sobrecarga na planta do pé e possui duas opções: tradicional e com inserção suave e extra suave. Produto hipoalergênico.

### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

#### TRADICIONAL DE GEL POLÍMERO

Código	Tamanho	Descritivo
8240	P - 35/36	Com abertura sem inserção - Tradicional de gel polímero
8241	M - 37/39	Com abertura sem inserção - Tradicional de gel polímero
8242	G - 40/42	Com abertura sem inserção - Tradicional de gel polímero
8243	XG - 41/42	Com abertura sem inserção - Tradicional de gel polímero

#### TRIPLA CAMADA DE GEL POLÍMERO

Código	Tamanho	Descritivo
8300	P - 35/36	Com abertura + Inserção suave e extra suave
8301	M - 37/39	Com abertura + Inserção suave e extra suave
8302	G - 40/42	Com abertura + Inserção suave e extra suave
8303	XG - 41/42	Com abertura + Inserção suave e extra suave

Produto cadastrado na ANVISA nº 10349310004



## CALCANHEIRA DE GEL PARA DESCANSO

Elaborada para diminuir o impacto ao caminhar. Promove o alívio das dores e desconforto no calcanhar em geral, melhorando a sobrecarga da região posterior do pé. Produto hipoalergênico.

### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Descritivo
8244	P - 35/36	Calcanheira de gel para descanso
8245	M - 37/39	Calcanheira de gel para descanso
8246	G - 40/42	Calcanheira de gel para descanso
8247	XG - 41/42	Calcanheira de gel para descanso

Produto cadastrado na ANVISA nº 10349310004



## PRÓTESE MAMÁRIA DE GEL

A Prótese Mamária tem a finalidade de uso em pessoas que fizeram mastectomia. Prótese de gel polímero, de uso externo, de formato completamente natural, lavável e auto aderente. Possui propriedades essenciais de gel, que em contato com cicatrizes ativas ajuda na regeneração da pele. Apresenta volume e peso muito parecido com o peso da mama natural, portanto, não requer corpetes ortopédicos. Cor adequada para uso com roupas de cor clara. Possui duas capas de tecido que podem ser trocadas, feitas de poliamida na frente (mantendo a forma) e algodão puro no reverso, protegendo a pele sensível. A prótese externa apresenta ótima durabilidade e conforto, sem costuras ou relevos.



### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Descritivo
8409	Busto 36/38	Circunferência de busto 75 - 80cm
8410	Busto 38/40	Circunferência de busto 80 - 85cm
8411	Busto 40/42	Circunferência de busto 85 - 90cm
8412	Busto 42/44	Circunferência de busto 90 - 95cm
8413	Busto 44/46	Circunferência de busto 95 - 100cm
8414	Busto 46/48	Circunferência de busto 100 - 105cm
8415	Busto 48/50	Circunferência de busto 105 - 110cm



## LÂMINA DE GEL PÓS-CIRURGIA MAMÁRIA

Indicada para prevenção e reabilitação de quelóides, ajudando na cicatrização. Evita atrito com tecidos, diminuindo a hipersensibilidade em cicatrizes e/ou hipertrofia de origem cirúrgica ou traumática. Elaborada para contornar de forma perfeita a mama trazendo mais conforto no seu uso. Possui dimensão de 20cm (comprimento) x 11,5cm (largura). Muito utilizada em cirurgias plásticas de mamoplastia, mastectomia total ou parcial e reconstrução dos seios.



### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Descritivo
8125	Único	Contém 1 par

Produto cadastrado na ANVISA nº 10349310016

## LÂMINA DE GEL PÓS-CIRURGIA ABDOMINAL

Indicada para prevenção e reabilitação de quelóides ajudando na cicatrização, evitando atrito com tecidos, diminuindo a hipersensibilidade em cicatrizes e/ou hipertrofia de origem cirúrgica ou traumática no abdômen. Possui dimensão de 20cm (comprimento) x 4,5cm (largura). Elaborada para contornar de forma perfeita o abdômen, trazendo mais conforto no seu uso. Muito utilizada em cirurgias plásticas, abdominoplastia e cesarianas.



### INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Código	Tamanho	Descritivo
8126	Único	Contém 1 par

Produto cadastrado na ANVISA nº 10349310015

MEIAS COMPRESSIVAS



SISTEMA DE COMPRESSÃO PNEUMÁTICO INTERMITENTE DOCTOR LIFE®



COBERTURA DE FERIDAS



PRODUTOS ORTOPÉDICOS E REABILITAÇÃO



BANDAGENS E DISPOSITIVOS COMPRESSIVOS



WWW.VENOSAN.COM.BR  
 VENOSAN BRASIL  
 SAC@VENOSAN.COM.BR  
 +55 81 3538.8929

Qualidade Suíça

